

POUR SECOURIR UN MEMBRE AMPUTÉ EN ATTENDANT LES SERVICES D'URGENCE.

SEUL DISPOSITIF AGRÉÉ



1500 victimes par an avec de graves conséquences sur leur avenir professionnel.

• Livré prêt à l'emploi, en malette de polystyrène (isotherme et anti-chocs).

Caractéristiques : Dispositif d'urgence à usage unique, de froid régulé autonome et instantané, permettant la récupération et le transport, dans des conditions optimales, d'un membre sectionné (doigt, main) en vue d'une greffe potentielle.

Abaissement contrôlé de la température de 20°C à 4°C en 90 secondes, au contact du ou des membre(s) sectionné(s), avec maintien entre 4 et 10°C, conformément aux besoins physiologiques, pendant 3 heures, à l'aide de la nouvelle formule au REFRISOL®.

7649287	REFRIMED de 1 à 9 unités
7649287	REFRIMED dégressif pour achat de 10 à 49 unités
7649287	REFRIMED dégressif pour achat de 50 et +

- ▶ Validité 3 ans
- ▶ Nouvelles normes Européennes
- ▶ Modèle déposé.




Déchirer l'enveloppe transparente de préservation d'asepsie entourant la poche Refrimed®.



Localiser les sachets de liquide situés à l'intérieur de chacune des faces de l'enveloppe.



Presser fortement ces sachets jusqu'à leur éclatement.

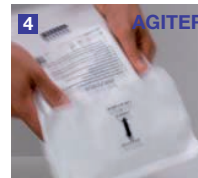

Agiter la poche Refrimed®, pendant 20 secondes, vérifier que le froid commence à se faire sentir, au moyen du test de température se trouvant sur la poche.



Replacer la poche sur l'une des faces internes de la malette.



Mettre la paire de gants.



Saisir la pièce anatomique sectionnée.



Introduire la pièce anatomique dans la poche Refrimed®.



Refermer la poche Refrimed® à l'aide de la bande adhésive.



Repositionner correctement la poche dans la malette isotherme et refermer le tout.



Inscrire sur la fiche de transmission d'informations, située sur le couvercle de la malette :
- le nom du blessé,
- le nombre et le type de pièces anatomiques récupérées,
- la date et surtout l'heure.



Poser les scellés autour de la poignée par sécurité.

Dispositif Médical de la classe II A
(Directive 93/42 CEE), conforme à l'obligation de marquage CE par organisme notifié.
Conception et fabrication sous système d'assurance-qualité.

Services :
SECURIMED peut vous proposer le suivi de la péremption du produit.