

FICHE AUDIT SCHILLER « FRED EASY / FRED EASY LIFE »

Société :
(Collectivité, administration, entreprise...)

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :




Marque et Type :

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : DSA **Schiller Fred Easy**)

En précisant si Entièrement Automatique « DEA » ou Semi « DSA »

Numéro de série du défibrillateur :

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : S/N **058999030007**)

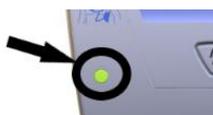

L'indicateur du défibrillateur clignote : Oui / Non

Présence de choc, fissure, bruit suspect : Oui / Non

Date de la mise en service :

Date de fabrication (si présente, a l'arrière du DAE) :

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

Date de péremption et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »

Date : Lot :
Cochez la référence : 021-0020 9121-001 Autre, précisez :

Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »

Date : Lot :
Cochez la référence : 021-0021 9121-000 Autre, précisez :

Date du dernier changement de la batterie lithium :

N° de lot de la batterie lithium :

(Se trouvant sur la pile lithium bleue « retirez-là »)

Date de péremption de la batterie lithium :

(Se trouvant sur le devant de la pile lithium bleue)



Date du dernier changement de la pile de sauvegarde :

(Pile de sauvegarde soudée sur la carte électronique dans l'appareil. L'étiquette d'origine en haut à gauche, a l'arrière du DAE est présente. Si elle est non percée et identique à la photo, cochez « Etiquette d'origine »)


Numéro de la version et hardware :

(Pour obtenir la version (A), il faut allumer le défibrillateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Noter la version commençant par « V » inscrite sur le cadran et également le numéro Hardware (B). Attention, cette information reste que 2 à 3 sec.

Renouvelez l'opération si besoin. Ex : **V07.06B2 0003102106**)

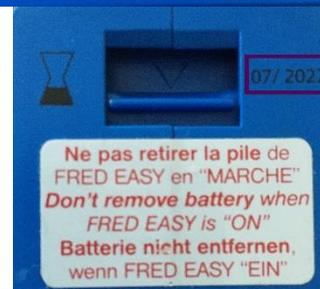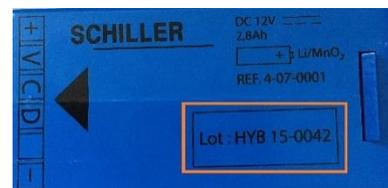

Etiquette d'origine

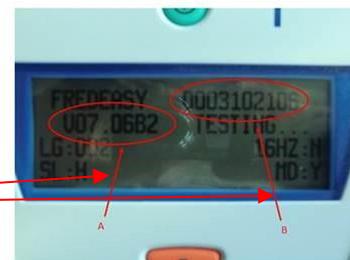

Le défibrillateur est stocké en permanence entre 15°C et 25°C : Oui / Non

(Boitier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs)

Remarques spécifiques :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :