

# Visite contrôle défibrillateur sous contrat - 23/11/2020 par Florian VERNAY

System Administrator <mg.planning@defibril.fr>

dim. 08/11/2020 09:06

À Jean-louis Coulon <Jean-louis.Coulon@defibril.fr>;

ATTENTION: pour toute réponse au présent mail, merci de ne pas utiliser la fonction "Répondre" de votre mail (votre réponse ne serait pas traitée), mais de cliquer sur le lien suivant : [alexiane.hita@defibril.fr](mailto:alexiane.hita@defibril.fr)

Bonjour,

Je vous informe de la venue de notre technicien Florian VERNAY, le 23/11/2020 pour l'entretien prévu au contrat N°92.2020.01.001 de votre défibrillateur dont les caractéristiques sont :  
X14B653864, ZOLL AED PLUS , 27 Rue du Docteur Schweitzer 94260 FRESNES ,

Lors de cet entretien, nous procéderons si nécessaire au remplacement de vos batteries et de vos électrodes afin de garder votre défibrillateur en parfait état de fonctionnement.

Si besoin, merci de m'indiquer par mail à l'adresse suivante : [alexiane.hita@defibril.fr](mailto:alexiane.hita@defibril.fr) les coordonnées d'une personne à contacter lors de son arrivée.

Un rappel vous sera adressé 3 jours avant la visite.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement éventuel

Cordialement

Gestionnaire des Plannings MATECIR-DEFIBRIL

Alexiane HITA

[alexiane.hita@defibril.fr](mailto:alexiane.hita@defibril.fr)



[www.defibril.fr](http://www.defibril.fr)

[www.facebook.com/pages/Matecir-Défibril/490280277753587](https://www.facebook.com/pages/Matecir-Défibril/490280277753587)

Pour tout dépannage, SAV ou conseil technique, contacter le 0810 00 46 77 ou envoyer un mail à [assist.tech@defibril.fr](mailto:assist.tech@defibril.fr)

# Rappel Visite contrôle défibrillateur sous contrat - 23/11/2020 par Florian VERNAY

ven. 20/11/2020 09:06

À : Jean-louis Coulon <Jean-louis.Coulon@defibril.fr>;

**ATTENTION:** pour toute réponse au présent mail, merci de ne pas utiliser la fonction "Répondre" de votre mail (votre mail ne serait pas traité), mais de cliquer sur le lien suivant : [alexiane.hita@defibril.fr](mailto:alexiane.hita@defibril.fr)

Bonjour,

Je fais suite à notre précédent email d'il y a une douzaine de jours et je vous confirme la venue de notre technicien Florian VERNAY, le 23/11/2020 pour l'entretien prévu au contrat N°92.2020.01.001 de votre défibrillateur dont les caractéristiques sont :

X14B653864, ZOLL AED PLUS , 27 Rue du Docteur Schweitzer 94260 FRESNES ,

Je vous rappelle que lors de cet entretien, nous procéderons si nécessaire au remplacement de vos batteries et de vos électrodes afin de garder votre défibrillateur en parfait état de fonctionnement.

Si besoin, merci de m'indiquer par retour de mail les coordonnées d'une personne à contacter lors de son arrivée

Je reste à votre disposition pour tout renseignement éventuel

Cordialement

La responsable des Plannings MATECIR-DEFIBRIL

Alexiane HITA

[alexiane.hita@defibril.fr](mailto:alexiane.hita@defibril.fr)



[www.defibril.fr](http://www.defibril.fr)

[www.facebook.com/pages/Matecir-Défibril/490280277753587](https://www.facebook.com/pages/Matecir-Défibril/490280277753587)

Pour tout dépannage, SAV ou conseil technique, contacter le 0810 00 46 77 ou envoyer un mail à [assist.tech@defibril.fr](mailto:assist.tech@defibril.fr)

# Compte-rendu de maintenance de Florian VERNAY du 23/11/2020 pour le défibrillateur X14B653864

[maintenance@defibril.fr](mailto:maintenance@defibril.fr)

lun. 23/11/2020 10:17

À : Jean-Louis Coulon <[Jean-Louis.Coulon@defibril.fr](mailto:Jean-Louis.Coulon@defibril.fr)>;

Cc : Jean-Louis Coulon <[Jean-Louis.Coulon@defibril.fr](mailto:Jean-Louis.Coulon@defibril.fr)>; Jean-Louis Coulon <[Jean-Louis.Coulon@defibril.fr](mailto:Jean-Louis.Coulon@defibril.fr)>;

1 pièce(s) jointe(s) (256 Ko)

CR - Zoll AED Plus-1606122972155\_266.pdf;

**ATTENTION:** pour toute réponse au présent mail, merci de ne pas utiliser la fonction "Répondre" de votre mail (votre réponse ne serait pas traitée), mais de cliquer sur le lien suivant : [alexiane.hita@defibril.fr](mailto:alexiane.hita@defibril.fr)

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu d'intervention du défibrillateur X14B653864 situé 27 Rue du Docteur Schweitzer , 94260 FRESNES suite à la visite de maintenance de notre technicien Florian VERNAY en date du 23/11/2020.

Cordialement

La Direction Technique MATECIR DEFIBRIL

04 75 33 30 76

ISO 9001 Management de la qualité

ISO 13485 Dispositifs Médicaux / Service et vente de défibrillateurs en accès public

AFNOR NF S99-170 Maintenance de Dispositifs Médicaux

<http://www.defibril.fr/>

Hotline / veille technique 0810 00 46 77 [assist.tech@defibril.fr](mailto:assist.tech@defibril.fr)

Vidéo de présentation : <http://www.youtube.com/watch?v=FV-K9uy5gg0>

Nom du technicien : **Florian VERNAY**      Date : **23/11/2020**      N° de rapport : **90291**  
 Type d'intervention : **Assistance**

Nom du client : **Coulon Jean-Louis**      N° du contrat : **92.2020.01.001**      Emplacement DAE :  
 Adresse DAE : **27 Rue du Docteur Schweitzer , 94260 FRESNES**

Jours et horaires d'ouverture du client : **8h à 20 du lundi au vendredi DAE personnel**

Référent 1 : **COULON Jean-Louis**      Tel : **06 07 27 18 56**  
 Email : **jean-louis.coulon@defibril.fr;jean-louis.coulon@defibril.fr**      Portable :

Référent 2 :      Tel :  
 Email : ;      Portable :

N° série du DAE : **X14B653864**      Modèle du DAE : **ZOLL AED PLUS**      Version DAE : **P;06:24**  
 Date de mise en service :      Installation : **Intérieure**

Mode de récupération des données : **Port infrarouge**  
 Jours et horaires d'accès au DAE : **8h à 20 du lundi au vendredi DAE personnel**

**Informations connues à notre arrivée**

Date d'installation des Piles : **02/09/2019**      Marque des piles : **Duracell**      Date de fabrication des piles :  
 Date de prochain changement des piles : **02/09/2024**      DLU des piles :

Marque des piles de réserve :      DLU des piles de réserve :      Date de fabrication des piles de réserve :

Date de péremption électrodes adultes : **28/09/2024**      N° de lot électrodes adultes : **2619A**  
 Date de péremption électrodes adultes de réserves :      N° de lot électrodes adultes de réserves :

Date de péremption électrodes enfants :      N° de lot électrodes enfants :  
 Date de péremption électrodes enfants de réserves :      N° de lot électrodes enfants de réserves :

Type de support : **INCONNU**      N° de série du support :      Options du support :

**Compte-rendu de l'intervention**

	Contrôle	
	OUI	NON
Le N° de série du DAE est conforme aux indications connues et son état général est satisfaisant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'une housse de transport et état général satisfaisant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le port infrarouge du DAE est en bon état (non fissuré, dépoussiéré)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le capot du DAE est présent et en bon état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le label interface (pictogrammes) est en bon état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence de ciseaux / rasoir / compresse absorbante / gants / Protection insufflations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les broches ou picots de connexions des électrodes dans le DAE sont en parfait état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les électrodes adultes sont présentes / non ouvertes / opérationnelles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Date de changement :</b> <b>Nouvelle péremption :</b> <b>Nouveau N° de lot :</b>		
Les électrodes enfants sont présentes / non ouvertes / opérationnelles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Date de changement :</b> <b>Nouvelle péremption :</b> <b>Nouveau N° de lot :</b>		
Les piles sont opérationnelles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Date d'installation :</b> <b>Nouvelle date de fabrication :</b> <b>Nouvelle DLU : 01/03/2028</b>		
<b>Nouvelle marque des piles :</b> <b>Nouvelle date prochain changement pile :</b>		
Les électrodes adultes de réserves sont présentes / non ouvertes / opérationnelles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Date de changement :</b> <b>Nouvelle péremption :</b> <b>Nouveau N° de lot :</b>		
Les électrodes enfants de réserves sont présentes / non ouvertes / opérationnelles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Date de changement :</b> <b>Nouvelle péremption :</b> <b>Nouveau N° de lot :</b>		
Présence de pile de réserve	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Date de changement :</b> <b>Nouvelle date de fabrication :</b> <b>Nouvelle DLU :</b>		
<b>Nouvelle marque des piles :</b>		
L'ensemble des partie métalliques du DAE sont en parfait état (absence de rouille...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A l'allumage les leds rouges des pictogrammes fonctionnent et le chrono s'affiche sur l'écran LCD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les inscriptions de l'écran LCD de l'appareil sont lisibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les messages émis par le haut-parleur sont clairs et compréhensibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'autotest manuel de fonctionnement s'est déroulé avec succès	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification du choc conseillé sur la fibrillation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification de l'envoi du choc dans le simulateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification du métronome et de la correction de l'amplitude du massage cardiaque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification du choc déconseillé sur un rythme cardiaque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom du technicien : **Florian VERNAY**

Date : **23/11/2020**

N° de rapport : **90291**

Type d'intervention : **Assistance**

Nom du client : **Coulon Jean-Louis**

N° du contrat : **92.2020.01.001**

Emplacement DAE :

Adresse DAE : **27 Rue du Docteur Schweitzer , 94260 FRESNES**

Jours et horaires d'ouverture du client : **8h à 20 du lundi au vendredi DAE personnel**

**Compte-rendu de l'intervention (suite)**

	Contrôle	
	OUI	NON
Mise en place de la nouvelle étiquette de suivi sur le DAE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'emplacement choisi pour le DAE est connu et permet un accès facile pour tout public	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence d'un support adapté à l'emplacement du DAE et état général satisfaisant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Le support est conforme aux informations connues	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nouveau type de support :</b>	<b>Nouvelles options :</b>	
Nouveau N° de série :		
Un représentant du client est présent pendant la vérification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nom Prénom : Mr COULON</b>		
La signalétique est conforme aux exigences réglementaires et est suffisante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le témoin de fonctionnement du DAE est visible de l'extérieur du support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devis à réaliser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Infos devis :**

Électrodes pédiatriques à commandé

Panne détectée

**Infos panne :**

**En cas de panne du DAE ou du boîtier, contacter l'assistance technique au 0810 00 46 77 ou assist.tech@defibril.fr**

**Commentaires :**

La Direction Technique

Signature du client : **Covid19**

**DEFIBRIL**  
**MATEOIR SAS**  
395 Rue Albert Camus  
"Le St Joseph II" Bât. H3  
06700 St Laurent du Var  
Tél : 04 93 01 46 54 - Fax : 04 93 01 42 99  
Siret : 751 038 571 00038

Le: **23/11/2020**

