

FICHE AUDIT PHILIPS « FR2 »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Marque, type et modèle :


A l'avant, en bas à droite pour le type

A l'arrière, en bas à droite pour le modèle

(Ex: **Philips Heartstart Fr2 M3841A**)

Numéro de série du défibrillateur :

A l'arrière du défibrillateur. (Ex : S/N **0405148123**)

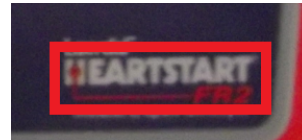

L'indicateur « sablier noir » du défibrillateur clignote : Oui / Non

Date de la mise en service :

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

Date de péremption, référence et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »

Date : Lot :

Cochez la référence : M3713A ☐ 989803139261 ☐ Autre, précisez ☐ :

Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »

Date : Lot :

Cochez la référence : M3870A ☐ Autre, précisez ☐ :


Date du dernier changement de la batterie lithium :

Install Before :

Lot :

Référence : M3863A ☐ Autre, précisez : **Origine : USA** ☐ Autre, précisez :

(Information se trouvant sur la batterie)

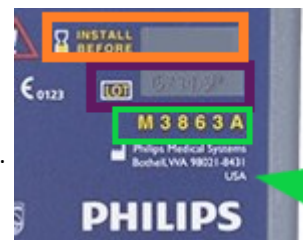

Numéro de la version :

(Pour obtenir la version, il faut allumer le défibrillateur. La version sera affichée sur l'écran. Ex : Rev 04 1.4 ABF3)

Date Guideline :

(Version norme ERC, protocole de secourisme, suivre la procédure à partir de la page 2)

Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 45°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐

Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :


Date :

Nom :

Signature Client / Référent :

Procédure de vérification des normes ERC


- 1 : Enlever la batterie puis la réinsérer
- 2 : Dans un laps de temps de 10 secondes vous aurez accès au menu principal ci-dessous, choisissez « SUIVANT » avec les boutons bleus d'option sur la droite de l'appareil (haut = OK / bas = descendre)

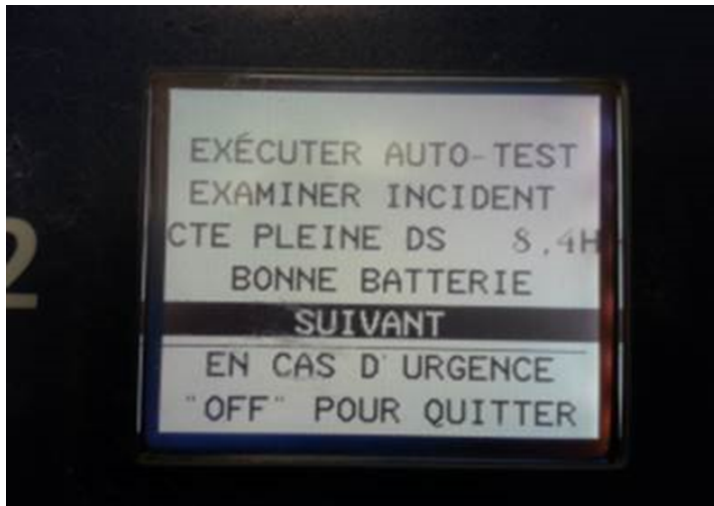

- 3 : Puis « OPTION ou CONFIGURATION »






- 4 : Puis « EXAMINER CONFIG »



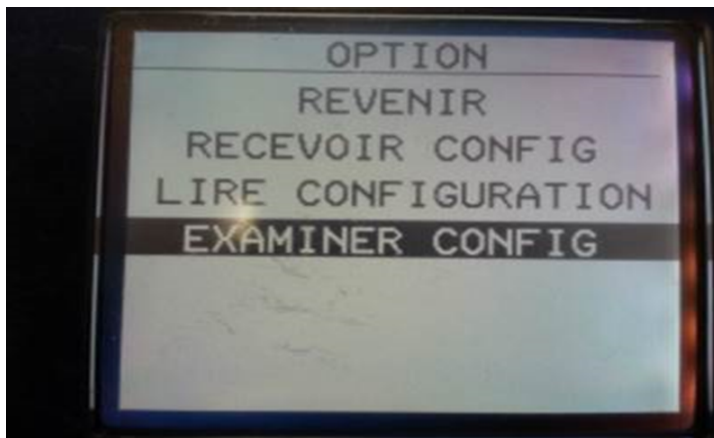


5 : En fonction de l'ancienneté de votre appareil vous obtiendrez **deux affichages différents concernant la configuration** :

Configuration 1

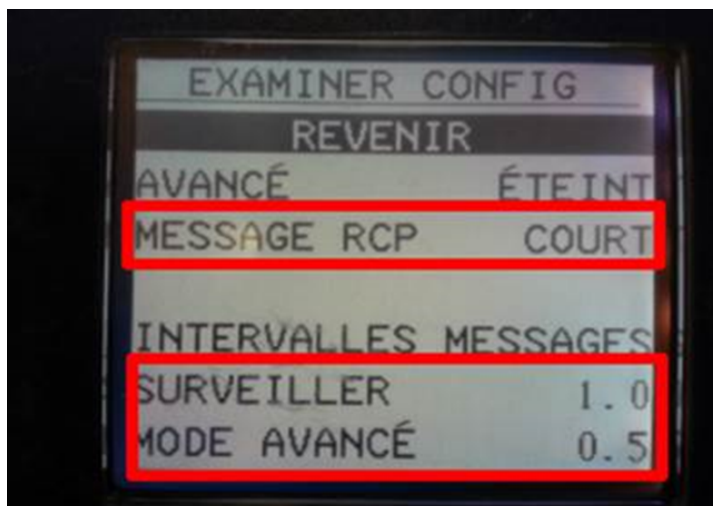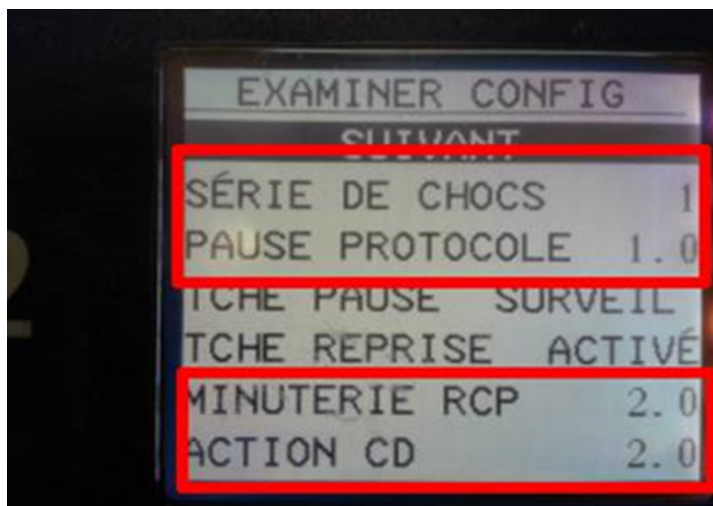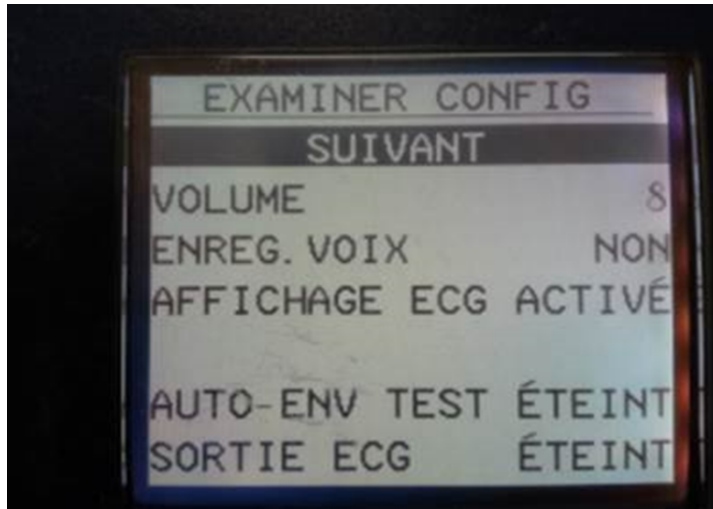

6 : Configuration 2

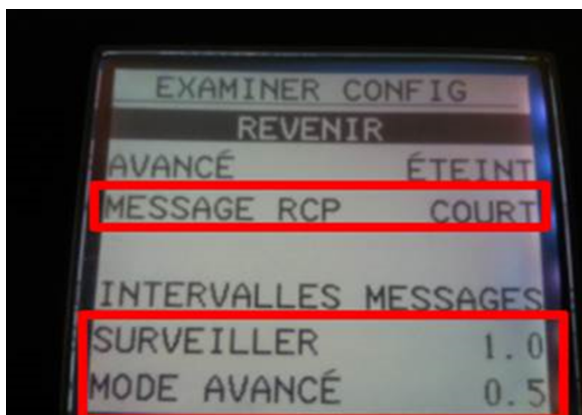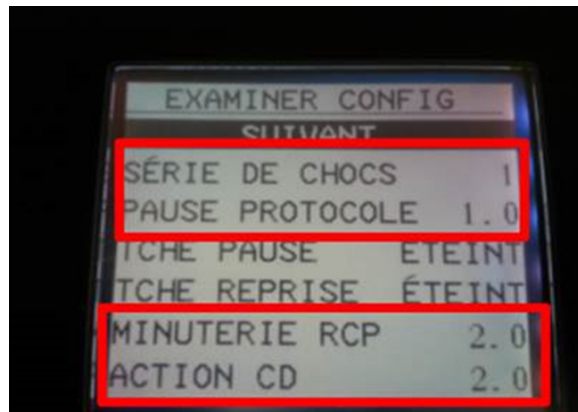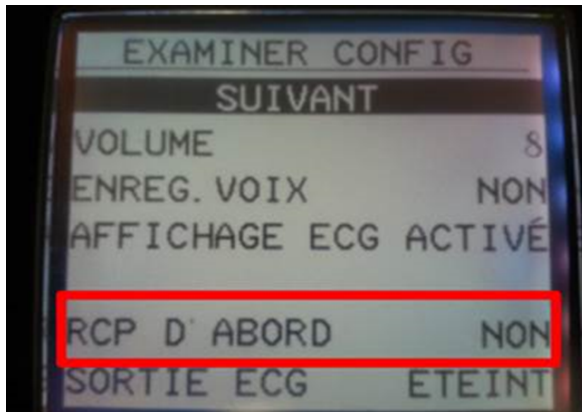

7 : Si vos écrans correspondent à ceux-ci-dessus vos appareils sont alors configurés selon les Guidelines 2005/2010.

Notez Guidelines : 2005/2010

8 : Si vos écrans ne correspondent pas, vos appareils sont alors configurés selon les Guidelines 2000 voir en dessous.

Nous allons devoir les mettre à jour selon une configuration spécifique moyennant une intervention. Notez

Guidelines : inférieur à 2005