

FICHE AUDIT DEFIBTECH « LIFELINE VIEW »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / /

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /



⇒ **Sur la face avant :**

L'indicateur du défibrillateur clignote en vert (En haut et à droite de la poignée) : Oui / Non

⇒ **Informations sur les électrodes**

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)



Électrodes « adulte » Cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée : ☐ DDP-2001

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : D103125-07

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2026-11-30

Électrodes « pédiatrique » Cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée : ☐ DDP-2002

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : D103125-07

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2026-11-30

⇒ **Retourner le défibrillateur**

Cocher le type de DAE de marque DEFIBTECH Lifeline view :

Référence : ☐ DDU-E2300F3 Si autre référence, précisez :

(A l'arrière du défibrillateur, en bas à gauche)

Date de fabrication du DAE : (A l'arrière du défibrillateur, en bas à droite, à côté du logo usine).

Numéro de série du défibrillateur : A l'arrière du défibrillateur (Ex : S/N 400047505)



⇒ **Retirer la batterie**

Date du dernier changement de la batterie lithium : / /

Cocher la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée : ☐ DBP-2003

Si autre référence, précisez :

Date Limite d'Utilisation : (à côté du logo « SABLIER »)

N° de série de la batterie : SN (à côté du logo « SN »)



⇒ **Remettre la batterie => L'indicateur du défibrillateur clignote en vert :** Oui / Non

⇒ **Numéro de la version :**

(Avec le DAE arrêté, appuyer sur le bouton central à droite de l'écran pour afficher les informations sur l'état du DAE. Ex : V2.5)

Si un message d'erreur et/ou un code sont présent, indiquez-les :

⇒ **Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ **Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :