

FICHE AUDIT PHYSIO CONTROL « LIFEPAK CR Plus »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / /

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /

⇒ Sur la face avant :

L'indicateur « OK » du défibrillateur est présent : Oui / Non



Si un des symboles CHARGE-PAK, CLÉ ou ATTENTION s'affiche.
Entourer le symbole et noter le nombre de bip à l'allumage.

Nombre de bip :

Symboles



⇒ Ouvrir le capot - Informations sur les électrodes

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Électrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 11103-000023 ☐ 11403-000002 Si autre référence, précisez :

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :-.....-..... Exemple : 2027-12-18


Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : K121824-02

Électrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 11101-000016 Si autre référence, précisez :

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :-.....-..... Exemple : 2028-08-14

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : K258544-03

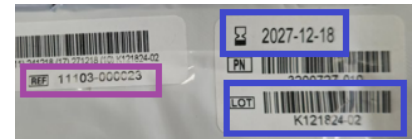

⇒ Retirer le charge-pak (batterie)

(le charge-pak est présent sur le côté du défibrillateur)

Date du dernier changement du charge-pak:/...../.....


Cochez la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée: ☐ 21300-004802

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») (Exemple : 2325

Date Limite d'Utilisation (à côté du symbole « SABLIER ») :-.....-.....

⇒ Remettre le charge pak => L'indicateur « OK » est présent : Oui / Non

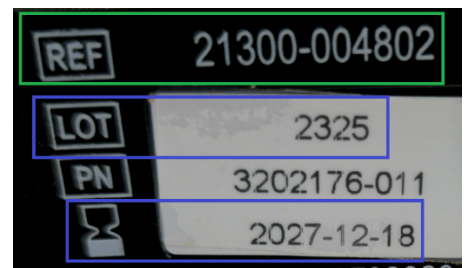

⇒ Retourner le défibrillateur


Cocher le type de DAE de marque PHYSIO CONTROL CR PLUS :

Référence : ☐ 97403-000001 ☐ 97403-000003 ☐ 99403-000001 ☐ 99403-000210

Si autre référence, précisez :

Date de fabrication : (à côté du symbole « USINE »

Numéro de série du défibrillateur : (à côté du symbole « SN »). Ex : 39944757

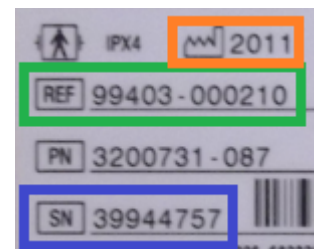

⇒ Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non Présence d'un accueil : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :