

FICHE AUDIT BEXEN CARDIO REANIBEX 100

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / / (Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /

⇒ **Sur la face avant :**


L'indicateur du défibrillateur clignote en vert (toutes les 10 sec) : Oui / Non

⇒ **Ouvrez le capot**

Cocher le type de DAE de marque BEXEN CARDIO REANIBEX 100 :

Référence : ☐ BEXEN CARDIO REANIBEX 100 DSA

☐ BEXEN CARDIO REANIBEX 100 DEA

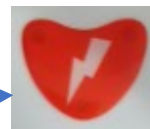

⇒ **Informations sur les électrodes**


(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Electrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ KSA 0502 A Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») :Exemple : 22DF1582

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :/..... Exemple : 2025/01

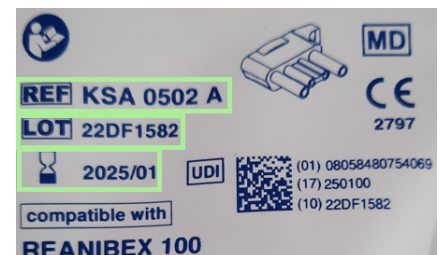

⇒ **Retourner le défibrillateur**

Numéro de série du défibrillateur :(A l'arrière du défibrillateur. Ex : 2022/200702015)

Options :

☐ WIFI ☐ SIGFOX ☐ (A l'arrière du DAE, proche du logo "COM". Ex : SIGFOX)

⇒ **Retirer la batterie**

Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....


Cocher la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée: ☐ DJS 3000

Si autre référence, précisez :

Numéro de série (à côté du symbole « SN ») :(Exemple : 2024/211007593)

Date Limite d'Utilisation (à côté du symbole « SABLIER ») :-


Date de fabrication de la batterie (seulement sur l'ancienne génération, à côté du symbole « USINE ») :-

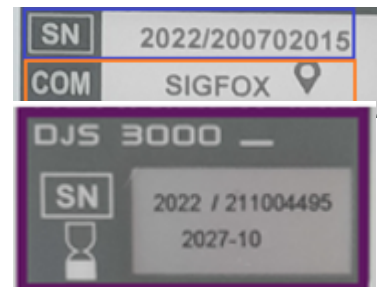

⇒ **Remettre la batterie => L'indicateur du défibrillateur clignote en vert (toutes les 10 sec) :** Oui / Non

⇒ **Clé (obligatoire suite à une action corrective) :**

(Présent entre le chapitre 6 et 7 du guide pratique, il s'agit d'un petit livret très souvent stocké dans la sacoche de transport du DAE. Exemple : &ABrU62r*TKf)

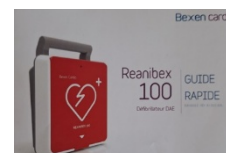

⇒ **Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cocher l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ **Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :