

FICHE AUDIT SCHILLER « FRED EASYPORT – EASYPORT PLUS »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :

Date de la mise en service : / / (Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /

⇒ Sur la face avant :

L'indicateur du défibrillateur clignote en vert : Oui / Non



⇒ Numéro de la version et hardware :

Pour obtenir la version. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé en allumant l'appareil.  Le menu de configuration s'affiche à l'écran. Sélectionnez le menu « Informations sur l'appareil » et vérifiez la version logicielle.

Bouton « OK » :



Bouton « suivant » :



⇒ Retourner le défibrillateur

Cocher le type de DAE de marque SCHILLER FRED EASY :

☐ 3.940050 ☐ 3.940060 ☐ 3.940063 ☐ 3.940066

Numéro de série du défibrillateur :

(à côté du symbole « SN ». Ex : 05899030007)

Date de fabrication (à côté du symbole « USINE ») :

⇒ Informations sur les électrodes

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Electrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 0-21-0040 Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 250711-4014

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2029-07-11

Electrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 0-21-0041 ☐ 2.1155067 Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 250114-05

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2027-06-25

⇒ Retirer la batterie

Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Cochez la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée : ☐ 4.350063

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : (Exemple : W1720)

Date de fabrication (à côté du symbole « USINE ») :

Date de Limite d'Utilisation (à côté du symbole « SABLIER ») :

⇒ Remettre la batterie ⇒ L'indicateur du défibrillateur clignote en vert : Oui / Non

⇒ Date du dernier changement de la pile de sauvegarde :/...../.....

(Pile de sauvegarde soudée sur la carte électronique dans l'appareil)

⇒ Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 50°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non Présence d'un accueil : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :

